

前言

感谢您使用本公司产品，请您在使用前仔细阅读此“手册”以便掌握正确的使用要领。

版权声明

桑田医疗科技有限公司（以下简称桑田医疗）不作任何形式的担保，包括（但不限于）为某一特定目标，对其提出的适销性与适合性的默示担保。桑田医疗对于本资料所包含的错误，或由于本资料提供的与实际表现和使用所造成的偶发或间接所害不承担责任。

本说明书包含受版权法保护的专有资料。版权所有，未经公司事先书面同意，不得对本说明书的任何部分进行扫描和复制，复印或翻译成其他语言。

本说明书所包含的内容可以不予通知而作出变更。

制造商的责任

桑田医疗仅仅在下列情况下才认为应对本产品的安全性，可靠性和性能负责。即：组装、重调、改进和修理均由桑田医疗认可的人员进行，使用的由网电源供电的外界设备应符合国家相关标准，以及产品按照说明书进行使用，按照随附文件进行评价。PEMS 与包含其他设备的 IT-网络的连接可能导致对患者、操作者、第三方带来以往没有识别的风险。

注意事项

- 在使用本器械前应全面地了解本器械的技术原理、临床应用范围及相关的各项风险；
- 本器械不能被用于预期用途外的其它目的；
- 在使用前敬请仔细阅读说明书；
- 本产品使用前请注意产品失效年月，超期禁用；
- 灭菌产品包装损坏后以及使用后，请按医疗垃圾处理；
- 报废的仪器应遵循国家法律法规处理；
- 灭菌产品为一次性使用，严禁二次使用或其他超出预期用途的使用；
- 非厂家人员请勿拆解本产品以及改装本产品；
- 依据法律法规，本产品仅供经过培训的医生使用；
- 请勿直视便携式电子阴道镜的光源或将光源照射他人；
- 充电时应保持室内通风，必须在本说明书要求的安装环境和条件中使用本产品，在指定的条件以外安装和使用本产品可能会导致出现不可靠的结果，导致产品的损坏；
- 本产品的放置尽量远离无线电接收器，电台，远离手机之类的发射源仪器；
- 本公司将在用户提出要求的时候，根据实际情况提供相关的电路图和元件清单。
- 本产品不能和心脏除颤器及高频手术设备同时使用。
- 本产品光源只能用于产品使用时的照明，不适用于其他使用环境。




【警告】 非授权人员切勿拆解本产品，电池更换需厂家进行更换，自行拆解可能会导致设备无法正常运行！本产品与第三方扩张器部件不兼容。本设备所连接的电脑要具有 3C 或 CE 认证。使用时擅自对网络进行后续修改、连接未经允许的网络及使用非本公司配套提供的软件所引入的新风险及所造成的任何问题或事故本公司不承担任何责任。本设备一般情况下，一年进行一次检查。

桑田便携式电子阴道镜操作手册 1.0

1、功能说明

- 【开/关机】：短按 2S 实现设备开/关机。
- 【拍照】：按压该按键实现画面定格与动态恢复。
- 【灯光】：实现灯光亮度逐渐递增。
- 【放大/缩小】：动态观察状态实现画面多级放大/缩小。
- 【WIFI】：WIFI 开启/关闭。
- 【USB 接口】：设备充电与图片传输。
- 【LED 指示灯】：电量充足为绿色，电量适中为黄色，低电量时为红色；
闪烁为 WIFI 模式，常亮为 USB 模式。

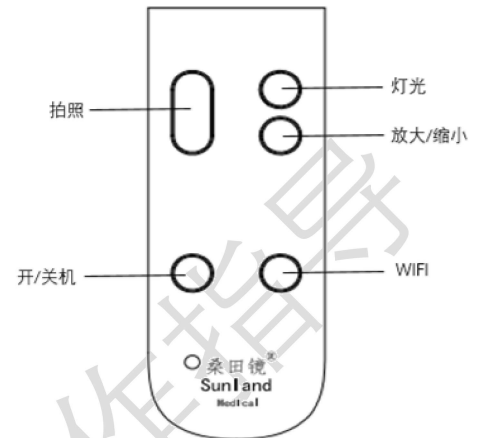

2、桑田镜使用步骤


● 首次使用时请参照以下步骤：

- 【1】 请确认电脑/平板已预装软件，若未安装请查看包装盒内 U 盘或联系厂商售后。
- 【2】 确保主机电脑充足，确保电脑及配件连接正常。
- 【3】 按压开关键开机（短按 2S），设备开启后 LED 指示灯呈闪烁状态。
- 【4】 选择设备链接模式，WIFI 或 USB 模式。
- 【5】 双击桌面“桑田医疗妇科视检镜软件”程序，在系统首页输入管理员账号、密码。
- 【6】 报告名称：点击系统首页 ⚙️ 标识设置医院报告名称，并保存。
- 【7】 账号管理：新建子账号，默认密码输入，使用子账号需重新登入软件。
- 【8】 问诊管理：新建患者档案，添加检查记录及实时观测影像信息。
- 【9】 观察拍照：实时观测影像、可逐级放大/缩小动态影像，并定格图片。
- 【10】 病例图库：查看图片。

WIFI 模式

- 【1】 观察 LED 指示灯状态，判断设备当前模式。“闪烁”为 WIFI 状态，“常亮”为 USB 状态。若 LED 已闪烁，则无需按压“WIFI”键；若 LED 常亮，请按压设备 WIFI 键进行切换，待闪烁后进入 WIFI 连接状态。
- 【2】 选择笔记本电脑屏幕右下侧 WIFI 图标，WLAN 选择设备热点，输入 WIFI 密码。
- 【3】 双击软件，点击“新建档案”，输入患者信息点击“保存”，自动进入下一步“问诊”→“观察拍照”→“选择设备”→“获取设备-WIFI”→“勾选图片”→“下一步”→“添加记录”→“保存”→“打印报告”/“导出报告”。
- 【4】 如需打印报告请使用无线网卡，WLAN 2 选择链接院内或诊室打印机的无线网络，建议使用打印机有线模式。

USB 模式

- 【1】 使用 USB 数据线插入设备 USB 接口及电脑接口。
- 【2】 观察 LED 指示灯状态，判断设备当前模式。“闪烁”为 WIFI 状态，“常亮”为 USB 状态。若 LED 闪烁，请按压设备 WIFI 键  进行切换，待 LED 常亮时进入 USB 连接状态。
- 【3】 双击软件，点击“新建档案”，输入患者信息点击“保存”，自动进入下一步“问诊”→“观察拍照”→“选择设备”→“获取设备-USB”→“勾选图片”→“下一步”→“添加记录”→“保存”→“打印报告”/“导出报告”。

- 多次使用时请参照以下新建步骤：

- 【1】 确保设备连接正常、登录软件成功后，选择问诊管理模块，双击某一档案。
- 【2】 点击“添加”，按照提示逐步进行。如需查看旧记录，可选中某条记录并点击查看，可导出及打印档案；点击“图库”可查看患者病情图库；点击“打印”可直接打印报告。

如有问题请联系厂商！感谢你们的支持与理解！